

## TERMÉKISMERTETŐ

Egyszer használatos, a kilélegzett levegőből való alkohol szintjének szűrésére szolgáló eszköz. Az egyszer használatos szonda a magyarországi zéró toleranciához kalibrált, így a legalacsonyabb 0,1‰ (ezrelék) véralkohol- / 0,05 mg/L légalkoholszint meghatározására alkalmas.

**Figyelem!** Az szervezetből kimutatható véralkoholszint, az utolsó alkoholfogyasztás időpontjától számítva, körülbelül egy órán keresztül emelkedik.

### Használati útmutató:

A pontos eredmény mérésének érdekében, legalább 15 perccel az utolsó alkoholfogyasztás időpontja után használja az alkoholesztet. A dohányzás és a rágógumizás befolyásolhatja a mért eredményt. Az alkoholesztet csak közvetlenül a használat előtt bontsa ki.

1. Távolítsa el az eszköz mindkét végén található műanyag zárókupakokat és a cső egyik végét illessze a felfújandó ballon nyílásába.
2. Semmiképpen ne lélegezzen be levegőt az eszközön keresztül! Vegyen egy mély levegőt, helyezze a cső szabad végét a szájához és egyenletesen fújjon az eszközbe, ameddig a ballon teljesen meg nem telik levegővel.
3. Várjon két percet. Amennyiben a két perc elteltével a teszt közepén található kristálygranulátumok elszíneződtek, az azt jelenti, hogy a tesztelő személy alkoholos befolyásoltság alatt áll.
4. A határértéket az eszközön található színskála határozza meg. (Az eredmény pontos leolvasásának érdekében, megfelelő fényviszonyok között hasonlítsa össze a granulátumok színét a skáláéval.) Ha a kristálygranulátumok színe megegyezik a skálán található árnyalattal, az azt jelenti, hogy a tesztelő alany véralkohol szintje eléri, vagy meghaladja a 0,1‰ (ezrelék) véralkohol szintet.
5. Vegyi anyagot tartalmaz, így használat után a műanyag kupakokkal zárja vissza a teszt csövének végeit, ily módon helyezze el háztartási hulladéktárolóban, hogy a környezetre ne jelentsen veszélyt.

AZ EREDMÉNY LEOLVASÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN **ALAPOSAN FIGYELJE MEG A KRISZTÁLYGRANULÁTUMOK KÖZÖTT LÁT-E SÖTÉT SZEMCSÉKET.** A SZEMCSÉK NEM EGYENLETES INTENZITÁSSAL SZÍNEZŐDNEK EL, NÉMELYIK VILÁGOSABB MARADHAT, AZ ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG ELLENÉRE IS.

**Kérjük vegye figyelembe:** A mérőeszközben található kristálygranulátumok részleges elszíneződése is egyértelműen jelzi, hogy a kilélegzett levegőben az alkohol jelenléte kimutatható. A termék hatáságilag nem hitelesített, kizárólag magán célra felhasználható, ezáltal peres eljárásokban nem szolgálhat bizonyítékként. Meghibásodás lehetősége nem kizárt. Az alkoholfogyasztás pusztán gyanúja (függetlenül a vizsgálat eredményétől) kellő indok ahhoz, hogy megakadályozza az ittasnak feltételezett személyt gépjárművezetés ügyében. Ilyen esetben egy másik, a hatóságok által hitelesített eszközzel (alkoholszonda) ajánlott egy újabb vizsgálatot elvégezni.

**Alap összetevők:** Üveg cső, biztonsági kupakok, mérésre szolgáló hatóanyag (jódvegyület), adszorbeáló granulátumok, szűrők, ballon, fúvóka.

**Figyelmeztetés:** A termék komponensei károsak lehetnek, ne nyelje le! A mérőanyag megfelelő felhasználás esetén nem mérgező. A szonda üveg csöve törékeny, sérülést okozhat!

### A biztonságos felhasználásra vonatkozó óvintézkedések:

- Elzárt helyen tartandó! Tartsa távol gyermekektől és állatoktól!
- A szonda üveg csövét feltörni, illetve az azt tartalmazó hatóanyagot (reagens) kibontani, kiönteni szigorúan tilos!
- Kerülje a reagens közvetlen érintkezését a szemmel és a bőrrel.
- Ne nyelje le és ne lélegezze be azt!
- Ne dobja tűzbe az eszközt!
- Amennyiben a szonda csöve összetörik és a reagens anyag kiszóródik ügyeljen az alábbiakra:

– Szemmel való érintkezése esetén: azonnal bő vízzel mossa ki, szemhéját eközben igyekezzon

tágra nyitott állapotban tartani. Konzultáljon szemész szakorvossal.

– Bőrrel való érintkezése esetén: bő vízzel mossa le.

– Lenyelése esetén: nagy mennyiségű víz fogyasztása ajánlott. Ne hánytassa magát! Azonnal hívjon orvost.

– Belélegzése esetén: menjen ki friss levegőre, és lélegezzen mélyeket. Szükség esetén hívjon orvost.

**Tárolása:**

1. Tartsa távol közvetlen hőtől és napsugárzástól.

2. Száraz helyen tartandó.

3. Tartsa távol gyermekek által könnyen elérhető helyektől.

Figyelem! Ez az eszköz magánhasználati célra készült, hatóságilag nem hitelesített, ezáltal nem használható bizonyítékként peres eljárásokban. A hivatalos hatóságok által alkalmazott szondáztatás eredménye a magáncélra tervezett alkoholteszt eredményére hivatkozva jogilag nem vitatható. A tesztet használó alany vállalja a felelősséget a vizsgálati eredmények értelmezéséért, illetve az ezt követő gépjárművezetéssel kapcsolatos döntéséért. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatáért, a használati útmutatásban foglaltak betartásáért, illetve az óvintézkedések elmulasztásáért.